

Modulite™

Invacare®  Modulite™



Assises adaptables et
personnalisables



L'assise **Modulite™** est conçue autour d'un ingénieux châssis télescopique. Simple et intuitive, sa conception permet une personnalisation précise et rapide de la largeur et de la profondeur d'assise pour une adéquation parfaite avec les besoins de l'utilisateur.

Modulite™ offre plusieurs types d'assises, de dossiers et de coussins afin de trouver la solution la plus adaptée à chaque utilisateur.

Avec *Invacare* **Modulite™**, vous pouvez choisir votre assise et votre dossier indépendamment !

Flexibilité maximale !



Châssis télescopique pour plus de modularité

Châssis d'assise réglable en largeur de 380 à 530 mm – Profondeur d'assise réglable de 410 à 510 mm en continu.



Système de rails

Ce système permet de moduler la position des accoudoirs et d'installer de nombreux accessoires de positionnement.



Ajustement du centre de gravité

Par le biais d'un second rail, la position du centre de gravité de l'utilisateur est ajustable pour améliorer les performances du fauteuil.



Faible hauteur d'assise

La conception de cette assise permet d'obtenir une hauteur d'assise réduite notamment avec une bascule d'assise à 30° et/ou un lift.

Les types d'assises



Assise **Modulite™** Standard

L'assise **Modulite™** existe également avec une plaque d'assise standard d'une largeur fixe de 430 mm. Cette assise bénéficie d'une profondeur réglable en continue de 410 mm à 510 mm. Ce réglage peut s'effectuer directement avec l'utilisateur assis sur le fauteuil pour limiter le nombre de transferts.



Assise **Modulite™** Modulable Rigide

Largeur d'assise réglable de 380 à 530 mm (peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil) – Profondeur d'assise réglable de 410 à 510 mm en continu. Les 3 plaques qui composent cette assise couvrent la totalité des largeurs et profondeurs disponibles.

Nouveau : profondeur jusqu'à 560 mm sur les fauteuils **TDX® SP2**, **TDX® SP2 NB** et **Pronto™ M41 AA2**.



Assise **Modulite™** Modulable Souple

Assise réglable en tension, en largeur (de 380 à 530 mm) - peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil et en profondeur (de 410 à 510 mm en continu) équipée de 9 sangles réglables par scratch, la souplesse de cette assise améliore le confort et le positionnement de l'utilisateur au quotidien.

Nouveau : profondeur jusqu'à 560 mm sur les fauteuils **TDX® SP2**, **TDX® SP2 NB** et **Pronto™ M41 AA2**.



Coussins d'assise **Flo-Tech®** et **Matrx®**

Les coussins **Flo-tech® Lite**, **Contour**, **Contour Visco** et **Matrx Libra** sont disponibles sur l'assise **Modulite™**. Leur galbe favorise un bon positionnement des membres inférieurs de l'utilisateur.

Les types de dossiers



Dossier réglable en tension avec pochette de rangement

La toile de dossier bi-matière est réglable en tension (7 ou 8 sangles selon la hauteur) afin de s'ajuster au mieux à la morphologie de l'utilisateur.



Dossier *Rea® Flex3* réglable en tension

Dossier réglable en hauteur et en largeur. Les tubes de dossier peuvent être inclinés vers l'intérieur ou l'extérieur.



Dossier *Rea® Flex3*

Le dossier **Flex3** est ajustable en hauteur et en largeur pour permettre une personnalisation du dossier selon la morphologie de l'utilisateur indépendamment de la largeur d'assise.



Dossier *Invacare Matrix®*

Les différents types de dossiers de positionnement **Matrix®** offrent aux utilisateurs un positionnement et un confort optimal.

Ajustements, réglages et accessoires



Modulite™ offre le choix parmi différents types d'inclinaison d'assise et de dossier. L'assise peut s'incliner manuellement de 0° à 12° ou électriquement de 0° à 30°. Le dossier bénéficie d'un point de pivot haut inspiré des fauteuils *Rea® Azalea®* offrant une compensation qui permet de limiter les effets de cisaillement et le phénomène de déshabillage de l'utilisateur lors de l'inclinaison du dossier. Il peut s'incliner manuellement ou électriquement de 0° à 30°. Les tubes ronds du dossier permettent d'adapter tout type de dossier de positionnement dont la gamme **Matrix®**.



Dossier démontable ou rabattable

Lors d'une inclinaison de dossier électrique, le dossier est rabattable sur l'assise grâce à un système inédit à démontage rapide. Lors d'une inclinaison de dossier manuelle, le dossier est démontable rapidement sans outils.



Cale-cuisse multi réglable

En option sur l'assise **Modulite™**. Disponible en différentes tailles.



Accoudoirs relevables et parallèles

Différents accoudoirs sont disponibles sur les assises **Modulite™** comme une version relevable qui facilite les transferts et une version relevable et parallèle qui permet de garder un meilleur maintien des membres supérieurs de l'utilisateur lors des inclinaisons d'assise.



Supports commande au menton

Avec escamotage manuel ou électrique, retrouvez la commande au menton Invacare en option sur l'assise **Modulite™**.




Accoudoirs et repose-jambes réglables en largeur et en profondeur (+ 25 mm par côté)



Cales-tronc et appuis-tête réglables en profondeur et en largeur

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

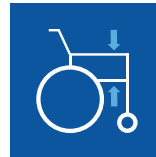	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur sol/siège	Hauteur de dossier	Hauteur des accoudoirs	Inclinaison de l'assise	Inclinaison du dossier
							
Invacare Modulite™	Réglable de 380 à 530 mm ¹	Réglable de 410 à 510 mm ²	440 à 490 mm ³	480 mm, 540 mm, 560 mm ⁴	270 à 390 mm	0° à 12° (man) ⁵ 0° à 30° (elec) ⁵ -5° à 25° (elec) ⁵	0° à 30°

1. Peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil.
2. Réglable de 410 à 560 mm sur les fauteuils **TDX® SP2** et **TDX® SP2 NB**
3. Mesurée sans lift - varie selon les modèles.
4. Hauteur de dossier maximum de 790 mm avec le dossier Flex 3
5. Varie selon les modèles.

Revêtements


Extra LK (Skaï noir, coutures orange)



Dartex noir




Matrx® micro aéré noir

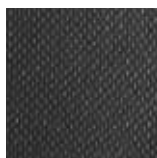

Bi-matière micro aéré



Mesh noir

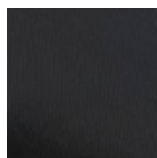

Disponible sur



Invacare® **Bora**
et **Bora Plus**



Invacare® **Kite**
et **Kite Plus**



Invacare® **Storm**⁴
et **Storm**⁴ **X-plore**

Invacare® **Modulite™**



Invacare® **TDX SP2**



Invacare® **TDX SP2NB**



Invacare® **Pronto™ M41**



Invacare® **Fox**